



BIO SKIN ITALIA srl

#### 4.2. Procedura per il cambio della lampada MoleMax II:

- Spegnere il sistema
- Svitare le due viti centrali del box scorrevole del MoleMax II (a destra e a sinistra dei connettori dei cavi) e aprire il box
- Sollevare i morsetti di sicurezza e rimuovere la lampada dal suo supporto
- Inserire la lampada nuova nel portalamпада (non toccare il vetro con le mani!)
- Far scivolare supporto e lampada nella posizione giusta. Assicurarsi che la lampada sia inserita correttamente (non ci deve essere spazio libero tra il portalamпада ed il suo alloggiamento). Se la lampada non viene inserita completamente emetterà una luce insufficiente!
- Abbassare i morsetti per fermare la lampada nella posizione corretta
- Chiudere il box scorrevole e rimettere le viti
- Accendere il sistema e controllare la funzionalità

